

Instrucciones de uso



1. Poner el bloqueo del dial hasta que haga click y, a continuación, abra adecuadamente la cubierta superior.



2. Deslizar el pie dentro de la estructura (cuerpo) del AF SERVO.



3. Ajustar el AF SERVO en el pie y empujar con firmeza el bloqueo del dial hasta que encaje.



4. Girar el dial en sentido de las agujas del reloj hasta ajustar el AF SERVO a la forma del pie.

Instrucciones de uso



AF SERVO® 앞서보®

ANKLE FOOT ORTHOSIS

S-dial™ Technology

www.afservo.com



Parkeuiji Ltd.

Bongeunsa-ro 64-Gil 8, Gangnam-gu,
Seoul 135-874, Korea

Tel. +82-2-307-4092/3 Fax. +82-2-307-4094
www.parkonp.com

|주| 박의지

우 135-874 서울 강남구 봉은사로64길 8 (삼성동)
성심빌딩 1층

Tel. (02) 307-4092~3 Fax. (02) 307-4094

EC REP

AeMi World

Bughenagen Str. 8, 10551 Berlin, Germany
Tel) +49-30-8620-3461 Fax) +49-30-8620-3789


Importador: Ortoibérica S.L.
ESB-33067505
www.ortoiberica.es

CE MADE IN KOREA © Parkeuiji Ltd. 2015

parkeuiji® LIVE FREE, LIVE TOGETHER 



ANKLE FOOT ORTHOSIS
S-dial™ Technology

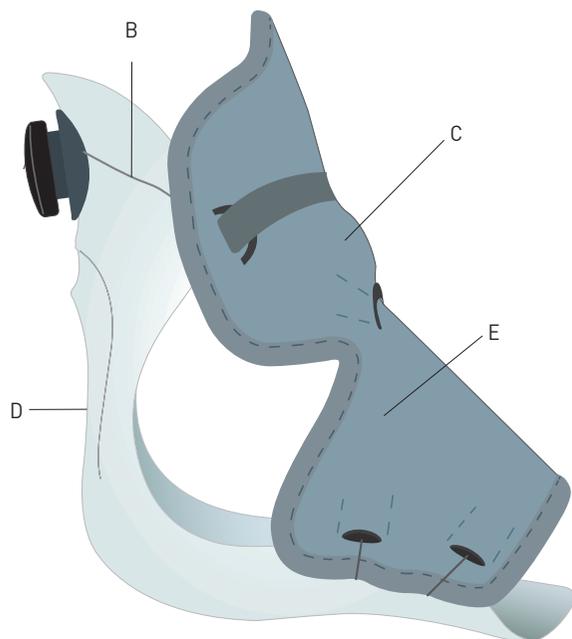

- A: S-dial
- B: Cable
- C: Cubierta superior
- D: Estructura (cuerpo)
- E: Guia del cable



Simple y Fácil!
Simple es fácil, Simple es creativo.

ORTESIS PIE TOBILLO (Tecnología S-dial)

Gracias por comprar AF SERVO. AF SERVO es una ortesis para pie y tobillo lista para llevar para pacientes con pie equino, que evita los retrasos de tiempo en la fabricación requeridos por los AFOs a medida, gracias al sistema de dial que permite el ajuste por parte del usuario.

El uso del sistema de dial del AF SERVO, en lugar de un velcro, consigue una firme adhesión de la ortesis a la forma del cuerpo del usuario y proporciona soporte y comodidad en el uso diario a un paciente con síntoma de pie caído, mientras que facilita tareas como ponerse o quitarse los zapatos. Además, el sistema de dial garantiza un ajuste cómodo y no permite el aflojamiento, así como la prevención de daños secundarios.

Uso previsto

AF SERVO es una ortesis para pie y tobillo que está destinada a ser utilizada para los síntomas de la caída del pie debido a lesiones como el ictus, la columna vertebral o daño en el nervio, fracturas óseas, etc. Este producto debe usarse sólo bajo la supervisión de un profesional médico, como un fisioterapeuta, médico, ortesista o protesista. Consulte a su profesional médico si este producto es adecuado para sus síntomas.

Advertencia

- 1) Este producto está diseñado para ser usado con los calcetines y para los síntomas de pie equino y sólo bajo la dirección de un profesional médico. Si usted experimenta algún dolor, hinchazón, cambios de sensibilidad o cualquier reacción inusual durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a un profesional médico.
- 2) Este producto es una ortesis de apoyo y no está garantizada para evitar lesiones.
- 3) No gire el dial en sentido contrario a las agujas del reloj, ni intente tomar el dial aparte, puede causar daños en el producto.
- 4) Este producto sólo es lavable a mano, con agua fría y un detergente suave. No usar lejía, ni apretar (retorcer).
- 5) Secar a la sombra, y no utilizar secadora ni exponer al sol o al calor.